



**GÉFONDE**

**Manuel d'utilisation**

Version 1.0

# INTRODUCTION


Cher client,

Nous vous remercions de votre achat, pour une meilleure utilisation de notre produit, veuillez lire attentivement les notifications ci-dessous :

- Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'emploi.
- Veuillez à conserver ce manuel d'utilisation.
- Ce manuel d'utilisation présente les détails que doit savoir l'utilisateur pour se prévenir des dangers et des dysfonctionnements ainsi que pour une utilisation correcte de l'appareil.
- Veuillez respecter les informations de ce manuel d'utilisation pour une bonne installation, l'utilisation et au bon fonctionnement de notre appareil.
- Il est interdit aux utilisateurs ou tous personnes non autorisé de réparer ou de démonter l'appareil.
- Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter.

**Ce matériel n'est pas un dispositif médical, ne pas utiliser pour traitement de maladie**

# Description de l'appareil

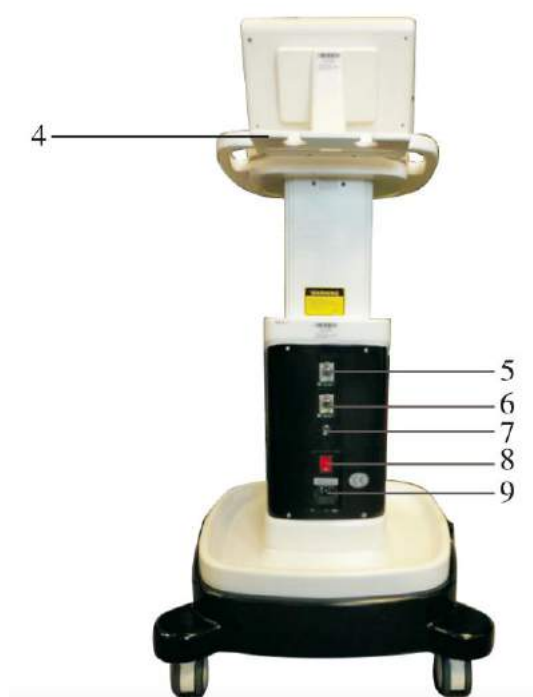

1. Ecran LCD
2. Régulateur/ touches de fonctions
3. Poignée
4. Repose accessoires
5. Masseur Géfonde grand
6. Masseur Géfonde petit
7. Prise plaque électrode
8. Bouton On/Off
9. Prise cordon d'alimentation

## Accessoires



Masseur Géfonde petit



Masseur Géfonde grand



Plaque électrode

**Lorsque vous nettoyez l'appareil, ne pas utiliser d'huile, alcool ou de produits chimiques sur les composants en plexiglass (écran, poignet, etc...)**

# Mécanisme d'action

Utilisation de la chaleur profonde et de la technologie des ondes à haute fréquence. Les électrodes permettent un mouvement thermique d'une durée plus importante de l'intérieur vers l'extérieur. Cet effet de chaleur en profondeur permet une amélioration du métabolisme du corps dans la réduction des graisses.

## Fonctionnement de base

1. Placez les accessoires sur le plateau puis les raccorder à la machine.

-----Branchez le grand masseur Géfonde sur la prise 5

-----Branchez le petit masseur Géfonde sur la prise 6

-----Branchez la plaque d'électrode sur la prise 7

2. Branchez le cordon d'alimentation (9) et allumez la machine (8). Entrez le mot de passe initial : « 000000 ».

3. Entrez dans l'interface :

-----Appuyez sur « paramètres », sélectionnez la langue, réglez la date, l'heure. Appuyez sur « sortir ». **Le paramètre avancé est réservé aux fabricants, ne pas utiliser.**

-----Appuyez sur l'icône du petit masseur Géfonde.

-----Appuyez sur l'icône du grand masseur Géfonde.

4. Appuyez sur l'écran tactile pour sélectionner les fonctions et définir les paramètres de configurations, vous pouvez également utiliser le régulateur puis appuyez sur le bouton OK.

Les instructions sont valables pour l'utilisation de l'écran tactile.

# Soin GÉFONDE

1. Nettoyez avec soin la zone à traiter.
  2. Choisissez la taille du masseur en fonction de la zone à traiter : le petit masseur pour les bras et la jambe, le grand masseur pour les cuisses et le ventre.
  3. Posez sur la plaque de l'électrode le gel de soin et faites en sorte que la peau du client appuie sur la plaque de l'électrode à proximité de la zone à traiter. Par exemple :
    - Placez la plaque sur les hanches lorsque vous pratiquez le soin sur le ventre.
    - Placez la plaque sur le ventre lorsque vous pratiquez le soin sur les jambes.
    - Placez la plaque sur les épaules lorsque vous pratiquez les soins sur les bras.
- Notez que la plaque doit de trouver du même côté (gauche/droite) que la zone à traiter.
4. Durée du soin : la durée du soin par défaut est de 30 minutes. Appuyez sur « paramètres durée » (variable entre 1 et 120 minutes) puis sur les flèches «  $\wedge$  » et «  $\vee$  » pour choisir la durée d'utilisation. Il est préférable de pratiquer le soin sur chaque zone entre 15 à 20 minutes.
  5. Réglez l'intensité des ondes. L'intensité par défaut est 1. Sélectionnez « puissance » puis les flèches «  $\wedge$  » et «  $\vee$  » pour sélectionner l'intensité de votre choix, variable en entre 1 (faible) et 10 (forte).
  6. Appliquez uniformément sur la zone de soin le gel ou la crème approprié pour une meilleure conduction de la chaleur et pour meilleure efficacité.
  7. Appuyez sur « démarrer », l'esthéticienne devra appuyer sur le bouton rouge du masseur pour démarrer le soin. Appuyez également sur ce même bouton pour mettre en pause.
  8. L'esthéticienne applique le masseur avec des mouvements lents et circulaires. L'intensité dépendra de la capacité de résistance du client et doit commencer du plus faible au plus fort, en intensité croissante. La surface de peau en contact avec l'électrode doit être lisse et les mouvements doivent être continues pour éviter toutes brûlures. L'esthéticienne prendra soin de communiquer avec le client au cas où la température devient trop importante.
  9. Lorsque la durée du soin programmé au préalable est terminée, le masseur s'arrête automatiquement.
  10. Nettoyez la peau à l'aide de l'eau tiède.
  11. Éteignez la machine. Nettoyez la partie en acier du masseur à l'aide d'un coton imbibé d'alcool, nettoyez la plaque d'électrode l'aide d'une serviette propre.

## Consignes d'entretien

1. Ne pas utiliser l'équipement sur un sol électrique.
2. Après le démarrage de l'équipement, ne pas toucher la plaque d'électrode.
3. Lors de l'utilisation de l'équipement, ne pas avoir de contact avec l'utilisateur.
4. Lors de l'utilisation de l'équipement, ne pas porter de bijoux.
5. Lors de l'utilisation de l'équipement, la plaque d'électrode doit être en contact avec la peau.
6. Veillez à faire des gestes circulaires sur la peau et ne pas restez plus de 3 secondes sur une zone de la peau.

## Interdit aux personnes

1. Personnes ayant un cœur artificiel ou un pacemaker ;
2. Personnes ayant des tendons artificiels, des broches...
3. En cas d'absorption abusive d'alcool ;
4. Personnes ayant des problèmes psychologiques ;
5. Personnes ne pouvant donner son accord ou ne pouvant se prendre en charge soi-même ;
6. Personnes ayant des maladies de grosses inflammations cutanées, des œdèmes pulmonaires, des tumeurs ;
7. Les femmes enceintes ;
8. Personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires
9. Personnes ayant des problèmes rénaux ;
10. Personnes souffrant de maladies contagieuses.

## Réglage de l'écran

1. Vérifiez que la machine est éteinte, appuyez sur l'écran puis allumez à l'aide du bouton On/Off.
  2. « Err0 » apparaît, puis « lâchez le bouton, en cours de préparation! Veuillez suivre les instructions... »
  3. Relâchez votre doigt, puis suivez les instructions :
    - Appuyez sur la touche « + » en haut à gauche.
    - Appuyez sur la touche « + » en haut à droite.
    - Appuyez sur la touche « + » en bas à droite.
  4. Appuyez sur la flèche en haut à gauche.
  5. Appuyez sur la flèche en bas à droite
- Fin de mise à jour de l'écran, entrez votre mot de passe.

# Caractéristiques techniques

Alimentation: AC100~240V 50/60Hz

Puissance:  $\leq 95$  VA






Taille fusible : FL5X20/3.15A

Normes : GB4706.1-2005



## Accessoires

Produits	Quantités
Machine Géfonde 10	1
Masseur Géfonde petit	1
Masseur Géfonde grand	1
Plaque électrode	1
Cordon d'alimentation	1
Manuel d'utilisation	1
Repose accessoires	1
Vis M4X12	x6 (repose accessoires x4, écran LCD x2)
Vis M4X16	x2 (bas écran LCD x2)
Tourne vis M3	1
Ecran LCD	1

# Guide des signes

 Danger	Risque d'entraîner la mort ou des blessures graves si utilisation abusive.
 Avertissement	Risque de provoquer la mort ou des blessures graves.
 Attention	Risques de blessures ou un endommagement du matériel* si l'on ne respecte pas les instructions
 Danger	Dispositif sous haute tension.
 Attention	Une mauvaise manipulation de l'installation peut causer des blessures.

## Contre-indications

<p>1/ Interdiction d'utilisation pour les personnes ayant les symptômes suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personnes ayant un cœur artificiel ou un pacemaker ;</li> <li>2. Personnes ayant des tendons artificiels, des broches...</li> <li>3. En cas d'absorption abusive d'alcool ;</li> <li>4. Personnes ayant des problèmes psychologiques ;</li> <li>5. Personnes ne pouvant donner son accord ou ne pouvant se prendre en charge soi-même ;</li> <li>6. Personnes ayant des maladies de grosses inflammations cutanées, des œdèmes pulmonaires, des tumeurs ;</li> <li>7. Les femmes enceintes ;</li> <li>8. Personnes souffrant d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires</li> <li>9. Personnes ayant des problèmes rénaux ;</li> <li>10. Personnes souffrant de maladies contagieuses.</li> </ol>	 Danger
<p>2/ Utilisation sous la surveillance d'un professionnel :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Période de menstruation ;</li> <li>2. Enfants ;</li> <li>3. Personnes ayant des maladies ou des problèmes cutanés ;</li> <li>4. Personnes insensibles à la chaleur ou au froid ;</li> <li>5. Personnes ayant subi une intervention chirurgicale ;</li> <li>6. Personne ayant fait de la chirurgie esthétique.</li> </ol>	 Avertissement



# Dépannage

1. Ne pas laisser l'appareil à proximité d'objets pouvant encombrer l'utilisation de l'équipement.
2. Ne pas utiliser l'appareil :
  - à proximité d'une source de chaleur ou en exposition directe aux rayons du soleil ;
  - dans un endroit très humide ;
  - à proximité de zone poussiéreux.
3. Si vous rencontrez un problème, coupez l'alimentation électrique et débranchez l'appareil. Par la suite informez-en votre distributeur. Il est strictement interdit à l'utilisateur de réparer ou de démonter l'appareil.
4. Responsabilités :
  - Exclusion des responsabilités en cas
    - dommages résultant d'incendie, de la foudre, de la tempête, du vandalisme ou du transport non sécurisé.
    - dommages engageant la responsabilité d'un tiers ou résultant d'une faute intentionnelle.
    - dommages résultant de l'entretien et de l'usage non conforme aux prescriptions du constructeur ou négligence.
5. Ne pas placer l'équipement contre un mur, laissez au moins 30cm de distances libres autour.

# Sécurité et environnement

Pièces	Substances ou éléments toxiques et dangereux						Remarques
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	polybromo biphényles (PB)	Polybromo diphényléther (PBDE)	
Plastique	O	O	O	O	O	O	
Circuit imprimé	X	O	O	O	O	O	
Courant	X	O	O	O	O	O	
Accessoires	X	O	O	O	O	O	

## Indications :

**O** Présence de substance dans la limite de la réglementation SJ/T11363-2006  
**X** Présence de substance supérieure à la limite de la réglementation SJ/T11363-2006. Dans une période d'utilisation normale, il n'y a pas de fuites ou de modifications chimiques de ces substances ou éléments et n'engendrera pas dommages corporels ou matériels. Les matériaux doivent suivre un traitement approprié, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

## Contact:

Tel: 00 33 7 83 58 83 68

Email: [info@temps.paris](mailto:info@temps.paris)

site: [www.letemps.paris](http://www.letemps.paris)

@Paris Le temps